


## TAGNING AV TEGO-PROV

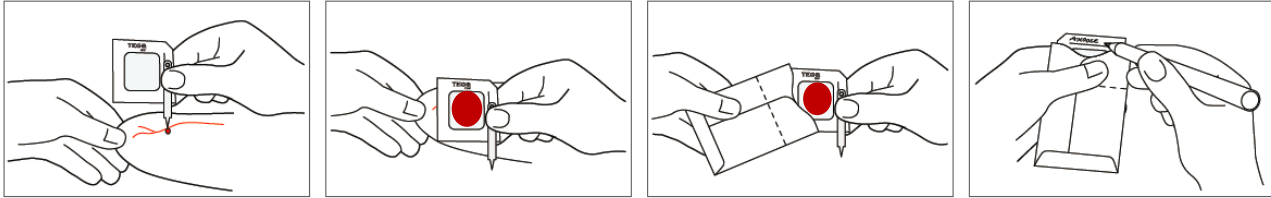

1. Håll lansetten och sugpappret så som bilden visar. Stick ett hål med lansetten i blodådern som syns på baksidan av örat. Om blodådern syns dåligt, kan man massera örat så det blir varmt. Man kan lysa med ficklampa genom kalvens öra från andra sidan, så ådrorna syns bättre.
2. Sug genast upp några droppar blod i pappret. **Blodet bör täcka en yta MINST så stor som ett en euros mynt helt igenom.** Blodet koagulerar snabbt, så man kan vara tvungen att "mjölka" det ur ådern.
3. Vifta pappret i luften en stund innan det läggs i förvaringspåsen.
4. Skriv kalvens eu-signum på ID-raden på sugpappersarket.
5. Vik fast påsens öppning. Slut inte påsen med hjälp av tejp!
6. Sänd provet i ett vanligt kuvert eller låda till Fabalab.

### VIKTIGT:

- Använd lansetten bara på ett djur. Om man använder samma lansett på flera djur, riskerar man infektioner, och även en liten droppe blod från ett annat djur ändrar genomtestets resultat.
- Förvara de använda lansetterna exempelvis i en gammal syltburk med lock. Lämna inte dem så att barn eller djur kommer åt dem. Vissa apotek tar emot använda nålar.
- Blodprov som absorberats på sugpapper får sändas i vanligt kuvert med normal post. Det ryms ungefär 20 provkort i ett vanligt kuvert av storlek C5.
- Lägg inte proverna i plastpåse eller exempelvis i kuvert med skyddsplast, finns risk att de möglar!
- Proverna kan förvaras i rumstemperatur.
- Proverna ska faktureras när de ankommer till Fabalab.
- **För tvillingars genomtest behövs hårprov eller DNA-öronmarke prov.**

Tilläggsinformation och anvisningar:

**Fabalab Service**  
**PB 95**  
**15871 HOLLOLA**

Tel. 043 825 1003  
 fabalab@faba.fi  
 www.faba.fi