




## TAGNING AV HÅRPROV

För provtagningen behövs klisterlappar (t.ex. post-it- lappar) och små förslutbara plastpåsar. **Provet skall tas från ändan av djurets svans**, där hårtofsarna (rötterna) är som störst.

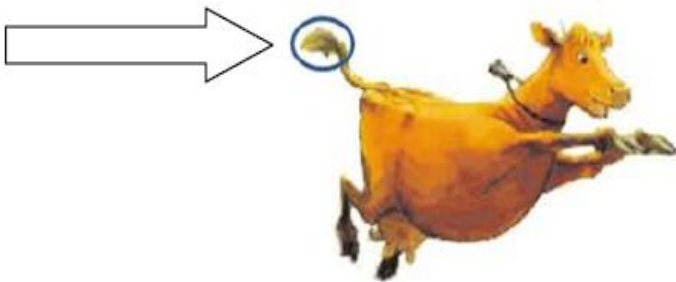

Vid behov kan du tvätta provtagningspunkten med rent vatten. Borsta bort de lösa håren. Använd skyddshandskar, i fall det är möjligt. Du kan också knycka bort håren utan handskar, bara du tvättar händerna noggrant före provtagningen.

1. Kontrollera uppgifterna för djuret som undersöks.
2. Plocka från djuret 30-50 tjocka hårstrån med hårrötterna från ändan av djurets svans. Du kan också använda pincett.
3. Sätt håren på klisterlappen på så vis, att hårrötterna lämnar ett par cent utanför papprets kant.
4. Vik lappen dubbelt med limytorna mot varandra.
5. Sätt klisterlappen med håren i plastpåsen och förslut påsen omsorgsfullt.
6. Märk ut på påsen djurets uppgifter (namn, öronnummer, födelseidentifikation).
7. Skicka provet med posten, helst genast efter provtagningen. Hårproven håller, om det är absolut nödvändigt, några dagar i rumstemperatur.
8. Proverna ska faktureras när de ankommer till Fabalab.

Tilläggsinformation och anvisningar

**Fabalab-service**  
**PB 95**  
**15871 HOLLOLA**

Tel. 043 825 1003  
fabalab@faba.fi  
www.faba.fi